



# Mascherine FFP2

Taglia XS - monouso / non-sterile



Box 10 pezzi



Involucro singolo

**Mascherina filtrante taglia XS**  
Disponibile in 5 colori (bianco, rosa, azzurro, rosa, viola)

# Mascherine FFP2

## Taglia XS - monouso / non-sterile

### CARATTERISTICHE

Mascherina FFP2 monouso taglia XS, in tessuto-non-tessuto (TNT), dotata di elastici auricolari che garantiscono grande comodità e aderenza a una vasta gamma di conformazioni del volto.

Adatta per la protezione delle vie respiratorie da aerosol e particelle non-oleose, polvere, smog, allergeni e altri agenti contaminanti.

Una volta usate, le mascherine monouso debbono essere immediatamente smaltite all'interno del bidone della raccolta indifferenziata, reggendola dagli elastici auricolari ed evitando contatti con la superficie. Seguire le norme locali vigenti per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati.

**Certificazione:** le mascherine sono dotate di attestato di certificazione CE e rispettano i requisiti delle norme tecniche armonizzate EN 149:2001+A1:2009.

**Confezionamento:** Busta 1 pz. / Box 10 pz. / Imballo 1000 pz.

### DETTAGLI TECNICI



#### FFP2 NR (monouso)

**Formato:** involucro singolo

**Dimensioni:** 12,0 \* 10,5 cm

**Standard Filtrazione:** EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR

**Condizioni di conservazione:** immagazzinare in luogo fresco e asciutto, a temperatura compresa tra -20° e 40° C. Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti. Se il confezionamento è danneggiato o bagnato scartare il prodotto. Non utilizzare oltre la data di scadenza (riportata sulla confezione)

**Durata d'utilizzo massima consigliata:** 8 ore

**Shelf life:** 3 anni dalla data di produzione


### FUNZIONI

Le Mascherine FFP2 vengono utilizzate frequentemente per prevenire contagi e per prevenire la respirazione di particelle dannose in ambito edile, nell'industria chimica, oppure come dispositivo di protezione da allergeni.

# Mascherine FFP2

## Taglia XS - monouso / non-sterile

### ISTRUZIONI PER L'USO

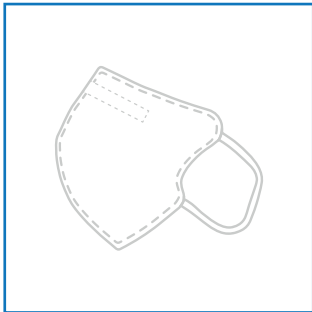

**Controllare l'integrità dell'involucro prima dell'uso. Se la confezione è rotta, non utilizzare.**

1. Aprire la confezione, controllando che la mascherina non rechi segni d'usura o macchie
2. Indossare la mascherina appoggiandola sul volto a partire dal naso. Agganciare gli elastici auricolari dietro le orecchie.
3. Modellare la mascherina adattandola alla forma del volto fino a un livello di aderenza ottimale
4. Modellare la mascherina sulle mani fino all'ottenimento di un'aderenza ottimale. Regolare clip nasale ed elastici finché la mascherina non aderisce al viso correttamente.
5. Premere entrambi le mani sulla mascherina e soffiare vigorosamente, controllando per mancate aderenze; regolare clip nasale e d elastici finché la mascherina non aderisce al viso correttamente.

### INDICAZIONI

Questa maschera non deve essere utilizzata se l'uso previsto del prodotto è quello di proteggere l'indossatore da alte concentrazioni di agenti infettivi (lavoro svolto a stretto contatto con batteri, virus e funghi - e.g. laboratorio).

Non protegge da gas e vapori (e.g. gas anestetici, fumiganti e gas tossici).

La mascherina non è sterile. Non deve essere utilizzata in tutte le procedure che richiedano il requisito della sterilità.

Per impedire potenziali contaminazioni, non riporre la mascherina in tasca o dentro a indumenti/borse e non appoggiare la mascherina su superfici. Se, durante l'uso, dovesse rendersi necessario rimuovere la maschera, evitare contatto con mani / naso / bocca e la superficie esterna della maschera.

La mascherina è monouso, non riutilizzabile o riciclabile.

### IMPORTANTE

Per un uso corretto, seguire attentamente le istruzioni d'uso. Materiali in diretto contatto con la pelle possono causare una reazione allergica in certi individui ipersensibili.